

Multi / Multi Light Edition

Tableau des hauteurs d'assise avants et arrières

Toute les valeurs indiquées sont hors coussin additionnel
La mesure utilisé est le centimètre (cm)
Par default la position standard sera de 48,8 cm à l'avant et 45 cm à l'arrière



Hauteur d'assise avant

Hauteur	Taille des roues			
	140 mm	6"	5"	4"
40				1C
41,25			1C	2C
42,5			2C	3C
43,75	2C			
		2C		
			3C	
45				4C
	3C			
		3C		
			4C	
46,25			4L	
	4C			
		4C		
		4L		
			5L	
47,5				6L
	5L			
		5L		
48,75			6L	
		6L		
			7L	
50	7L			
		7L		

C = fourche courte / L = fourche longue

Hauteur d'assise arrière

Hauteur	Taille des roues	
	22"	24"
37,5	1	
40	2	
		1
42,5	3	
		2
45	4	
		3
47,5	5	
		4
50	5	

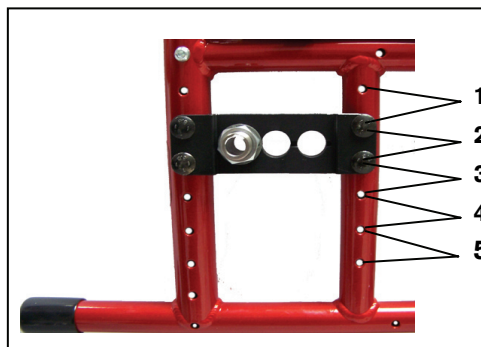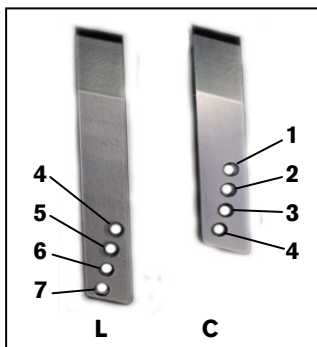

Avantgarde XXL2

Tableau des hauteurs d'assise avants et arrières

*Toute les valeurs indiquées sont hors coussin additionnel.
La mesure utilisé est le centimètre (cm)*

Hauteur d'assise avant

Hauteur	← A cocher	Taille des roues	
		140 mm	7"
45		2C	
47		1C	
		4L	
48		3L	
49			1C
			4L
49,5		2L	
50			3L
50,5		1L	
51			
51,5			2L
52,5			
			1L
53,5			

C = fourche courte / L = fourche longue

Hauteur d'assise arrière



Hauteur	← Notez la lettre	Position des roues	
		24°	26°
40		1	
42,5		2	
			1
44,5		3	
45			2
47		4	
			3
49		5	
49,5			4
51		6	
51,5			5
53,5			6

Si à la commande, aucune valeur ne nous est communiqué, un réglage d'usine en position D4 sera effectué

Largeur du fauteuil en fonction des largeurs d'assise (hors-tout)

Avec accoudoirs standard et protège vêtements	Avec accoudoirs réglables en hauteur	Avec roues arrières à frein à tambour
largeur d'assise + 16,5cm	largeur d'assise + 19cm	largeur d'assise + 20cm

*Les valeurs sont calculées avec un montage étroit de la main courante et un carrossage de 0°
(montage large de la main courante = + 20mm)*

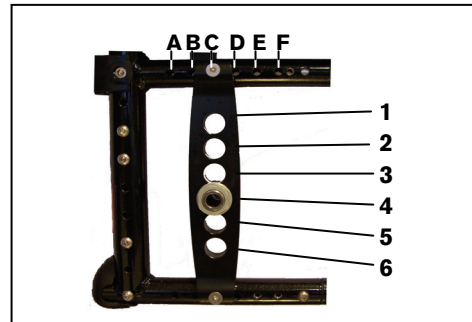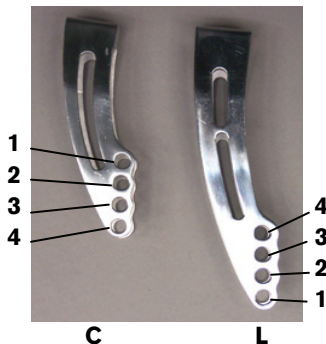

Voyager / Voyager Light Edition

Tableau des hauteurs d'assise avants et arrières

Toute les valeurs indiquées sont hors coussin additionnel
La mesure utilisé est le centimètre (cm)
Par default les positions seront de xx cm à l'avant et xx cm à l'arrière

Hauteur d'assise avant

Hauteur	← A cocher	Taille des roues			
		3"	4"	5"	6"
44		2C			
			3C		
45,25		1C			
			2C		
46,5			1C		
				2C	
47,75				1C	
					2C
48		2L			
			3L		
49				4L	
					1C
49,25		1L			
			2L		
50,5				3L	
					4L
51,75			1L		
					2L
53					1L

C = fourche courte / L = fourche longue

Hauteur d'assise arrière

Hauteur	← A cocher	Taille des roues			Hauteur	← A cocher	Taille des roues		
		22"	24"	26"			22"	24"	26"
38		0			45		7		
39		1							2
40		2			45,5		5		
40,5			0				8		
41		3			46				3
41,5			1		46,5		6		
42		4			47				4
42,5			2		47,5		7		
43		5			48				5
				0	48,5		8		
43,5			3		49				6
44		6			50				7
				1	51				8
44,5			4						

Largeur du fauteuil en fonction du carrossage (hors-tout)

Carrossage	Taille de la roue 24"
0°	+ 16 cm
3°	+ 22,5cm
6°	+ 29cm
9°	+ 35cm
12°	+ 41,50cm
15°	+ 47,50cm

